


Het toekennen van een zender aan de Caresse

Zenders met "plug en play" functionaliteit kunnen op de volgende wijze aan de Caresse worden toegekend:

Draai het zorgtoestel om, om zo het toetsenbord te zien.

Alle programmeringen beginnen en eindigen met een druk op de toets **P**. Telkens als een toets wordt ingedrukt, klinkt een toon die aangeeft dat de toets goed is ingedrukt. Na elke programmering klinkt wederom een toon.

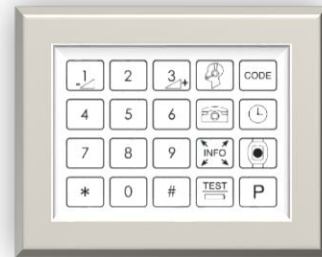

Toetsenbord

Stap 1 – Het toetsenbord deblokkeren

"Wanneer gelukt hoort u een Melodie"



Stap 2 – Verwijder alle "oude" zender door de volgende toetsen in te drukken.

"Wanneer gelukt hoort u een Melodie"



Stap 3 – Zender Activeren



Stap 4 – Druk nu binnen 2 seconden op de zender

"Wanneer gelukt hoort u een "pieptoon"



Stap 5 – Blokkeren van het toetsenbord.

"Wanneer gelukt hoort u een Melodie"



Stap 6 – Maak een test oproep

