



Het toekennen van een telecare-sensor aan de Lifeline Vi

Zenders met "plug en play" functionaliteit kunnen op de volgende wijze aan de Lifeline Vi worden toegekend:


Stap 1 – Druk op de groene annuleringsknop en houd deze ingedrukt, het zorgtoestel geeft nu een pieptoon. Laat de knop weer los. Als de spraak aan staat, hoort u de mededeling "programmeermodus". De rode LED van de alarmknop knippert nu langzaam.

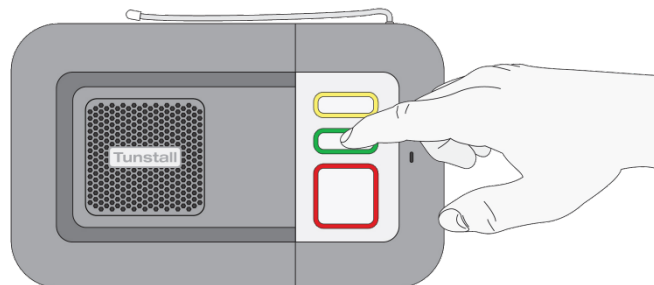


Stap 2 – Druk nu de groene annuleringsknop in, het zorgtoestel geeft weer een pieptoon. Laat de knop los en u hoort de mededeling als de spraak aan staat, hoort u de mededeling "registratie modus". De rode LED van de alarmknop knippert nu snel.

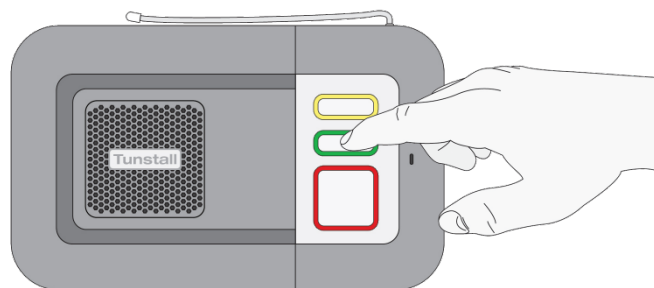

Stap 3 – Druk nu binnen **2 seconden** op de alarmknop van de zender, als de spraak aan staat het zorgtoestel meldt nu het type zender om de ontvangst te bevestigen anders hoort u een pieptoon.

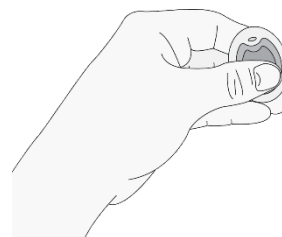

Stap 4 – Druk op de groene annuleringsknop en laat deze weer los. Het zorgtoestel geeft een pieptoon en is weer stand-by voor hulpoproepen. De rode LED van de alarmknop brand continue. En de kleine LED brand groen.

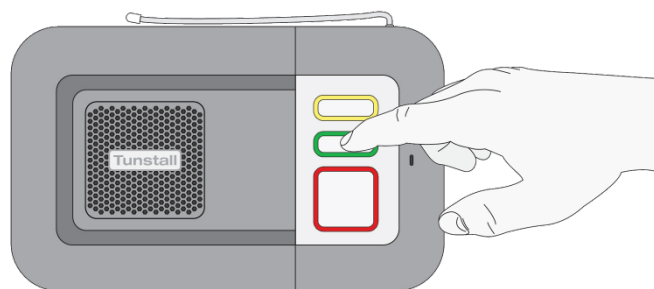

Stap 5 – Test de zender door deze te activeren en te controleren of er een hulpoproep wordt gemaakt. Lukt dit niet zorg er dan voor dat het toestel in rust staat en probeer het opnieuw.

