

## Comment attribuer un émetteur telecare à un Caresse

Les émetteurs dotés de la fonctionnalité "plug and play" peuvent être attribués au Caresse de la manière suivante:

Retournez l'unité d'alarme pour voir le clavier.

Toute programmation commence et se termine par une pression sur la touche. À chaque pression, une tonalité retentit indiquant que la touche a été pressée correctement. Une tonalité retentit après chaque programmation.




### Etape 1 – Débloquez le clavier

*"Si l'opération est réussie, vous entendrez une mélodie"*



### Etape 2 – Supprimez tous les "anciens" émetteurs en appuyant sur les touches suivantes.

*"Si l'opération est réussie, vous entendrez une mélodie"*

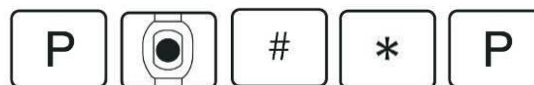

### Etape 3 – Activez l'émetteur



### Etape 4 – Appuyez sur l'émetteur dans les 2 secondes

*"Si l'opération est réussie, vous entendrez un bip"*



### Etape 5 – Bloquez le clavier

*"Si l'opération est réussie, vous entendrez une mélodie"*



### Etape 6 – Faites un appel test

