



Comment attribuer un émetteur telecare au Lifeline Vi

Les émetteurs dotés de la fonctionnalité "plug en play" peuvent être attribués au Lifeline Vi de la manière suivante:


Etape 1 – Appuyez sur le bouton d'annulation vert et maintenez-le enfoncé; l'unité d'alarme émet un bip. Relâchez le bouton. Lorsque la voix est activée, vous entendez le message "*mode de programmation*". La LED rouge du bouton d'alarme clignote lentement.

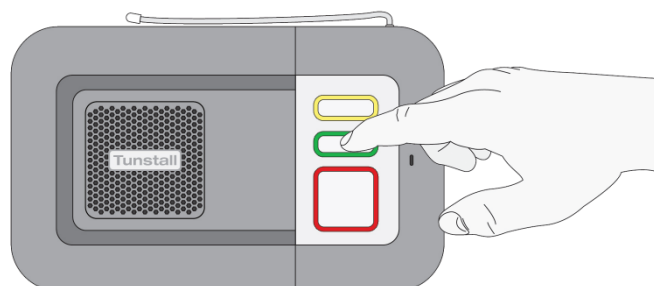


Etape 2 – Appuyez sur le bouton d'annulation vert; l'unité d'alarme émet un bip. Relâchez le bouton. Vous entendez le message suivant "*mode d'enregistrement*". La LED rouge du bouton d'alarme clignote rapidement.

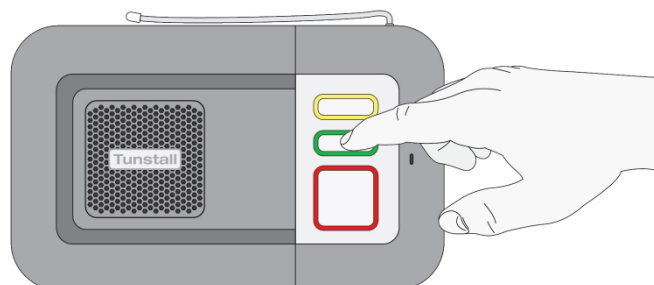

Etape 3 – Appuyez sur le bouton d'alarme de l'émetteur dans les **2 secondes**. Lorsque la voix est activée, l'unité d'alarme indique le type d'émetteur pour confirmer la réception, sinon, vous entendez un bip.

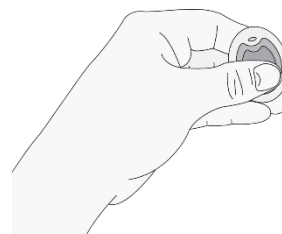

Etape 4 – Appuyez sur le bouton d'annulation vert puis relâchez-le. L'unité d'alarme émet un bip et est à nouveau en mode veille pour les appels d'aide. La LED rouge du bouton d'alarme est allumée en permanence et la petite LED est verte.

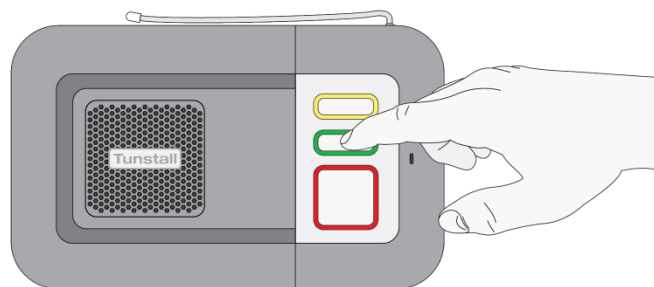

Etape 5 – Testez l'émetteur en l'activant et en vérifiant si un appel d'aide est en cours. Si cela ne fonctionne pas, assurez-vous que l'appareil est au repos et réessayez.

